

Ab sofort: Barcodeetiketten auch für Proben der Zytodiagnostik

Wir bieten Ihnen ab sofort neue übersichtliche Probenetiketten für die Zytologie-Proben an. Sie können so schnell und einfach die Objektträger und die Proben sowie den Laborauftrag bekleben.

Die Bestellung der Barcodes erfolgt über den Materialbestellschein.

Neu: Barcodeetiketten Zytologie **Artikel-Nr.: BE-4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1000 001500 SCHEIN | | 1000 001500 ZUSATZSCHEIN | |
| 1000 001500 01 | 1000 001500 02 | 1000 001500 03 | 1000 001500 04 |
|  |  |  |  |
| Probe 1 | Probe 2 | Probe 3 | Probe 4 |
|  |  |  |  |
| Probe 5 | Probe 6 | Probe 7 | Probe 8 |
| Name: 1000 001500 | | 1000 001500 | |
| Datum: | | 1000 001500 | |
|  | | 1000 001500 09 | |
| Name: | | Geb.-Datum: | |
| Vorname: | | | |

1. Bekleben des Objektträgers



QR-Barcode:

Probe 1-4, beginnend mit 1 verwenden.

Mit dem QR-Code auf die gleiche Seite kleben, wo auch das Material aufgetragen wird.

Hinweis: Bei Patientinnen mit mehr als zwei Objektträgern muss ab dem 3. Objektträger ein neues Barcodeetikett mit einem zweiten Auftragschein verwendet werden.

2. Bekleben der HPV-Probe



Strichcode-Probenetikett „Probe 5“ verwenden und keinen QR-Code auf die Probe kleben.

3. Bekleben kombinierter Untersuchung HPV + Dünnschichtzytologie



Strichcode-Probenetikett „Probe 5“ verwenden und keinen QR-Code auf die Probe kleben.


4. Bekleben des Laborauftrags Muster 39



Bei Blankoformularbedruckung für Muster 39:
Bekleben Sie den 1. Muster 39-Ausdruck mit **SCHEIN**
und den 2. Muster 39-Ausdruck mit **ZUSATZSCHEIN**.

5. Bekleben des Laborauftrags kurativer Auftrag / Igel / PRIVAT

Kurativer Schein LAS-44

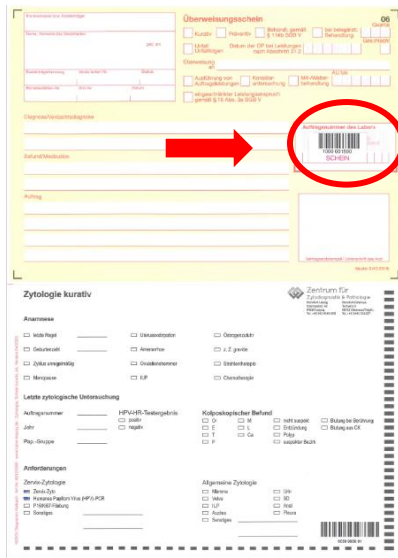

IGEL-Schein LAS-48



Privat-Schein LAS-49



Für Ihre Rückfragen stehen Ihnen Dipl.-Biol. Steffen Sander unter 0341-6565-616 und
Claudia Janek unter 0341-6565-602/-603 zur Verfügung.